

Tuotetiedot

Orotol® plus imulaitteiden desinfiointiaine



Orotol® plus yhdellä silmäyksellä

- Tiiviste hammaslääkärin imulaitteiden, amalgaaminerottimien ja suunhuuhtelulaitaiden samanaikaiseen desinfiointiin, hajunpoistoon, puhdistukseen ja hoitoon.
- Laaja vaikutusspektri: bakterisidinen, hiivasieniä tuhoava, rajoitetusti virusidinen (vaipalliset virukset ml. HBV, HCV ja HIV sekä vaipattomat adenovirukset, norovirukset).
- Testattu ajankohtaisten VAH-menetelmien ja eurooppalaisten standardien mukaan.
- VAH-lista.
- Livos kontaminoiduille imulaitteille – takaa varman infekti-suojan.
- Käyttöpitoisuus vain 2 %.
- Poikkeuksellinen puhdistusteho, poistaa pinttyneimmätkin kerrostumat, myös vaikeapääsyisistä paikoista.
- Aldehyditön – vaikutus perustuu kvaternäärisiin ammoniumyhdisteisiin.

Ominaisuudet

Dürr System-Hygiene -tuotesarjan Orotol® plus on erittäin tehokas tiiviste kaikkien hammaslääkärin imulaitteiden, amalgaaminerottimien ja suunhuuhtelulaitaiden samanaikaiseen desinfiointiin, hajunpoistoon, puhdistukseen ja hoitoon. Tarkasti valitut desinfiointi- ja puhdistuskomponentit puhdistavat laitteet tehokkaasti, vaahtoamatta sekä materiaali- ja ympäristöystävällisesti. Käytännöllä Orotol® plus -desinfiointiainetta päivittäin taataan myös suuressa bakteeri- ja likakuormituksessa (esim. sylki, amalgaami ja kiillepöly, veri jne.) imulaitteiden teknisesti ja hygieenisesti hoitteen käyttö.

Koostumus

Orotol® plus sisältää kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä, emäksisiä puhdistuskomponentteja, kompleksinmuodostajia, vaahto- nestoaineita ja apuaineita vesiliuoksessa. 100 g Orotol® plus -desinfiointiainetta sisältää 4,4 g dimetyyliidiotyylammoniumkloridia, 0,6 g bensyyliidimetyyldodecyylammoniumkloridia.

Mikrobiologinen teho

Orotol® plus vaikuttaa bakterisidisesti¹⁾, hiivasieniä tuhoavasti¹⁾, rajoitetusti virusidisesti (vaipalliset virukset ml. HBV, HCV ja HIV^{2),3)} sekä vaipattomat adenovirukset⁴⁾, norovirukset¹⁾). VAH-lista. Testattu EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 16615 mukaan.

Käyttö

Orotol® plus -desinfiointiaineen käyttöpitoisuus on 2 %. Täytä 20 ml Orotol® plus -desinfiointiainetta kylmällä vedellä yhteen litraan ja ime imuletkun kautta OroCupin avulla. Kaada suunhuuhtelualtaaseen vähintään 250 ml liuosta. Huuhtelee desinfioitu laite vaikutusajan kuluttua perusteellisesti vedellä. Suosittelemme imulaitteen puhdistamista ja desinfiointia Orotol® plus -desinfiointiaineella kuormituksesta riippuen 1–2 kertaa päivässä – kertaluontoisessa käytössä ainoastaan hoitotoimenpiteen päätyttyä.

Ympäristövaikutukset

OECD-kriteerien 301 D mukaan Orotol® plus on biologisesti helposti hajotava. Polyeteenistä ja polypropeenista valmistetun pak-

Tuotetiedot

Orotol[®] plus imulaitteiden desinfiointiaine

kauksen materiaalin voi lämpökierrättää. Pullo on huuhdeltava vedellä ennen kierrätystä. Katso tiivisteen hävittämistä koskevat ohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Fysikaaliset ominaisuudet

Tiiviste:

Ulkonäkö: kirkas, keltainen neste

Tiheys: $D = 1,09 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ (20 °C)

pH-arvo: $12,8 \pm 0,3$

Käyttöliuos (2 %):

Ulkonäkö: väritön liuos

pH-arvo: $10,5 \pm 0,5$

Säilyvyys

Tiiviste: 3 vuotta

Käyttöliuos 2 %: 1 vuorokausi

Pakkauskoko

2,5 l:n pullo

Säilytys

Säilytä valmistetta vähintään 5 °C:n ja enintään huoneen lämpötilassa.

Tarvikkeet

OroCup

Yleisiä ohjeita

Ime kylmä vesi sysäyksittäin imulaitteen läpi kirurgisten toimenpiteiden jälkeen. Tuotteen värin ja hajun muutokset ovat mahdollisia erityisesti säilytettäessä tuotetta auringonvalossa. Näillä väri- ja hajumuutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen desinfiointitehoon.

Varoitukset

Orotol[®] plus on luokiteltu ja merkitty CLP-määräyksen mukaisesti:

Käyttö	Pitoisuus	Vaikutusaika
Imulaitteiden desinfiointiaine (testattu VAH:n mukaan ala/instrumentit) ¹⁾	2 %	5 min.
Bakteerit ¹⁾ ja hiivasienet ¹⁾	2 %	5 min.
Vaipalliset virukset ml. HBV, HCV, HIV ^{2), 3)}	2 %	30 min.
Adenovirukset ⁴⁾	2 %	15 min.
Norovirukset ¹⁾	2 %	30 min.

1) Testattu suuressa kuormituksessa (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562, EN 14476).

2) Testattu ilman kuormitusta ja kuormitettuna DVV/RKI-suosituksen mukaisesti.

3) RKI-lausunnon mukaisesti (Bundesgesundheitsbl. 60, 353 - 363, 2017).

4) Testattu vähäisessä kuormituksessa. Suuri kuormitus: 2 % / 2 tuntia, 4 % / 15 min.

katso tuotemerkinnät ja käyttöturvallisuustiedote.

Riippumattomat lausunnot – omat tutkimukset

Lausunnot ovat saatavilla pyynnöstä.

CE 0124

Myynti

Dürr Dental SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Valmistaja

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de

